

Vejledning til Rodger Buddy ur

Uret oplades via USB-stik.

Når skærmen er sort, betjenes uret fra den runde afmærkning på displayet (ned mod armbåndets løkke).

Et let tryk viser tid, et tryk mere viser dato, et hurtigt tryk til viser tilbageværende batteritid i %.

AT SÆTTE TID OG DATO

Gå til timetallet (første skærm/display når skærm aktiveres). Tryk let for at skifte mellem 12 eller 24. Tryk længe for at vælge. Timetallet kommer frem, tryk let/hurtigt for at vælge timetal, tryk længe for at gemme. Minuttal kommer frem, tryk let/hurtigt for at vælge minut-tal, tryk længe for at gemme. Dato (dag) kommer frem, tryk let/hurtigt for at vælge, tryk længe for at gemme. Måned kommer frem. Tryk let/hurtigt for at vælge, tryk længe for at vælge.

AT SÆTTE ALARM

Sørg for at displayet er sort.

Pres på afmærkningen/knappen længe indtil A1 kommer op på displayet.

Tryk på knappen igen indtil dioderne/linierne glimter. Slip knappen. Tryk hurtigt for at aktivere alarmen (ON).

Vælg den ønskede alarm (fra A1 til A8) og tryk på knappen, når "ON" vises.

Vælg først timetallet (øverst). Hurtige klik på knappen skifter timetal. Hold knappen nede i længere tid for at bekræfte timetallet.

Når timetallet er bekræftet, vælges minut-tal og hold knap nede i lang tid for at bekræfte. Første alarm er sat.

Samme procedure for alarm A2, A3 etc.

AT SLUKKE FOR ALARMEN

Når alarmen brummer/vibrerer trykkes på aktiveringsknappen på skærmen for at stoppe den.

God fornøjelse